

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

AS SÉRIES MENU™

Modelo ME-SP
Retroauricular



O SEU APARELHO AUDITIVO MENU™ DA WIDEX

(A ser preenchido pelo audiologista)

- MENU3
- MENU5
- MENU10

Data: _____

Tamanho da pilha: 675

Programas:

<input checked="" type="checkbox"/> Padrão
<input type="checkbox"/> Música
<input type="checkbox"/> TV
<input type="checkbox"/> T
<input type="checkbox"/> M+T
<input type="checkbox"/> Padrão 1
<input type="checkbox"/> Aclimação
<input type="checkbox"/> Extensor de Audibilidade
<input type="checkbox"/> Zen

ÍNDICE


DESCRIÇÃO DO APARELHO AUDITIVO	1
Identificação do lado direito/esquerdo	2
Indicadores acústicos	2
A pilha	2
Colocação da pilha	2
Compartimento da pilha à prova de crianças	2
Indicação de carga fraca da pilha	2
Ligar e desligar o aparelho auditivo	2
Colocação do aparelho auditivo	3
Remoção do aparelho auditivo	3
Ajuste do volume	3
Programas de audição	3
Alternar entre os diferentes programas de audição	4
Utilização de um telefone	4
LIMPEZA	4
Aparelho auditivo	4
ACESSÓRIOS	4
EM CASO DE ANOMALIA	4
CUIDADOS A TER COM O APARELHO AUDITIVO	5
AVISOS	5
CONSELHOS	5
SÍMBOLOS	6

DESCRIÇÃO DO APARELHO AUDITIVO

O aparelho auditivo é usado com um dispositivo auricular que consiste num molde auricular e num tubo.

A ilustração abaixo mostra o aparelho auditivo sem auricular. A escolha do auricular deverá ser feita em função das suas necessidades específicas. Consulte o manual do utilizador referente a auriculares, fornecido em separado.

- 1: Abertura do microfone
- 2: Controlo de volume
- 3: Botão de programa
- 4: Botão ligar/desligar
- 5: Gaveta da pilha

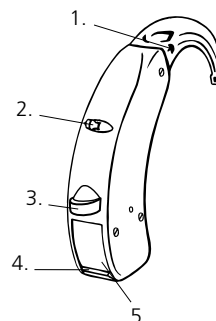

Se necessitar de ajuda para identificar o número de série (composto habitualmente por seis ou sete dígitos) no produto, por favor, contacte o seu audiologista.



AVISO

O aparelho auditivo pode produzir um nível de pressão sonora superior a 132 dB SPL. Pode haver risco de causar danos à sua audição residual.

NOTA

Além destas instruções de utilização, é fornecido, em separado, um manual do utilizador que descreve as diversas soluções de auriculares disponíveis para o seu aparelho auditivo: "Auriculares para aparelhos auditivos retroauriculares da Widex".



AVISO

Este guia, bem como o manual "Auriculares para aparelhos auditivos retroauriculares da Widex", contém informações e instruções importantes. Leia atentamente esta documentação antes de utilizar o aparelho auditivo.

NOTA

O aparelho auditivo, o auricular e os acessórios poderão não ser exatamente iguais aos apresentados neste guia. A Widex reserva-se o direito de introduzir quaisquer alterações que considere necessárias.


Utilização prevista

Os aparelhos auditivos destinam-se a ser dispositivos de amplificação de condução aérea a serem utilizados em ambientes auditivos quotidianos. Os aparelhos auditivos podem ser fornecidos com o programa Zen, destinado a proporcionar um fundo melódico relaxante (ou seja, música/fonte de som) para adultos que pretendem ouvir tal fundo em silêncio.

Indicações de utilização

Os dispositivos são indicados para indivíduos com níveis de perda auditiva que variam entre perda moderada (50 dB HL) a profunda (até 125 dB HL), bem como para todas as configurações de perda auditiva.

Devem ser programados por profissionais de saúde auditiva devidamente qualificados (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) que possuam formação em reabilitação auditiva.

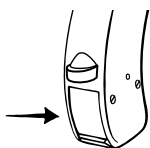

Identificação do lado direito/esquerdo

Se usar aparelhos auditivos em ambos os ouvidos, o aparelho auditivo esquerdo pode ser fornecido com uma marca azul.

A seta indica a posição da marca de identificação.

Indicadores acústicos

O aparelho auditivo pode ser programado para produzir um sinal que indica a utilização de determinadas funções. O sinal pode ser bips (SmartTone) ou uma mensagem falada (SmartSpeak)*. O sinal também pode ser desativado.

Funções	Configurações de fábrica	Outras configurações
Regular o volume	Tom	Desligado
Confirmação da utilização do botão de programas	Som de clique	Desligado
Mudar de programa	Tons	Mensagem/desligado
Ligar o aparelho auditivo	Tom	Mensagem/desligado
Aviso de pilha fraca	4 bips	Mensagem/desligado
Lembrete de assistência	Desligado	Mensagem

* O SmartSpeak não vem disponível como característica padrão.

A pilha

Nós recomendamos pilhas de zinco-ar. Utilize uma pilha de tamanho 675 para o aparelho auditivo.

Para adquirir pilhas de substituição, consulte o seu audiologista. É importante conhecer a data de validade e ler atentamente as recomendações sobre a eliminação de pilhas usadas, indicadas na embalagem. O não cumprimento destas recomendações poderá reduzir o tempo de vida útil da pilha.




Colocação da pilha

Antes de inserir uma pilha nova no aparelho auditivo, não se esqueça de retirar a proteção adesiva. Uma vez retirada a proteção adesiva, a pilha começará a funcionar passados alguns segundos.



ATENÇÃO
Não utilize pilhas que ainda apresentem restos de cola da proteção adesiva ou outras substâncias estranhas, sob pena de comprometer o funcionamento do aparelho auditivo.

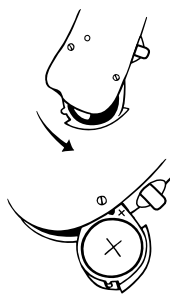


Para abrir a tampa do compartimento da pilha, utilize a respetiva saliência.

Coloque a pilha no compartimento, de modo a que o pólo positivo (+) da pilha surja em cima. Poderá utilizar o íman fornecido para orientar a pilha na sua posição correta.

Se o compartimento da pilha não fechar facilmente, tal significa que a pilha não está instalada corretamente.


Quando necessitar de substituir a pilha, lembre-se de efetuar esse procedimento em cima de uma mesa.

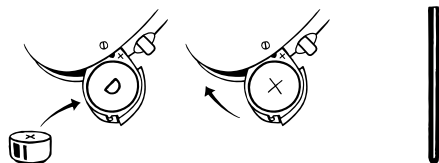

Compartimento da pilha à prova de crianças

Se o aparelho auditivo vai ser usado por uma criança, você tem a opção de pedir ao audiologista que forneça o aparelho auditivo com o compartimento da pilha à prova de crianças.

Poderá utilizar o íman fornecido com o aparelho auditivo para orientar a pilha na sua posição correta.

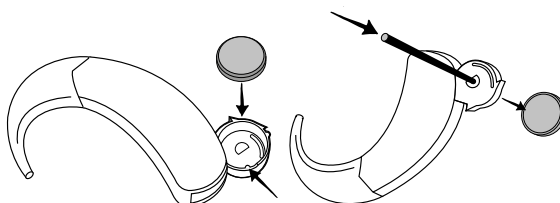

Indicação de carga fraca da pilha


Será ouvida uma mensagem de voz ou emitidos sinais sonoros quando a pilha estiver quase esgotada. Se a pilha se esgotar repentinamente poderá, contudo, não haver qualquer aviso. A Widex recomenda que tenha sempre consigo uma pilha de reserva.



AVISO
Nunca deixe uma pilha descarregada no aparelho auditivo. As pilhas sem carga podem dar origem a derrames de substâncias suscetíveis de danificarem o aparelho auditivo.



AVISO
O seu aparelho auditivo poderá deixar de funcionar se, por exemplo, a pilha estiver sem carga. Deverá ter em conta essa possibilidade, sobretudo quando estiver a conduzir ou em situações em que necessita de estar atento a sinais de aviso.

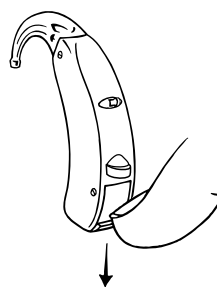


Ligar e desligar o aparelho auditivo

O compartimento da pilha do aparelho auditivo também funciona como botão de ligar/desligar.

Desloque o comutador para cima para ligar o aparelho auditivo.

Desloque o comutador para baixo para desligar o aparelho auditivo.

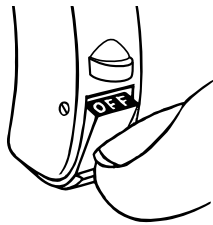


Ao desligar o aparelho auditivo, a palavra "OFF" será claramente visível no comutador.

Não se esqueça de desligar o aparelho auditivo quando este não estiver a ser utilizado. Retire a pilha, caso o aparelho auditivo não vá ser utilizado durante vários dias.

Colocação do aparelho auditivo

Introduza o molde no canal auditivo segurando ao mesmo tempo a parte inferior do tubo. O processo poderá ser facilitado se puxar a orelha para trás e para cima com a outra mão.

Coloque o aparelho auditivo atrás da orelha, encostado à cabeça, de modo a que o aparelho auditivo e o tubo fiquem apoiados confortavelmente na orelha.

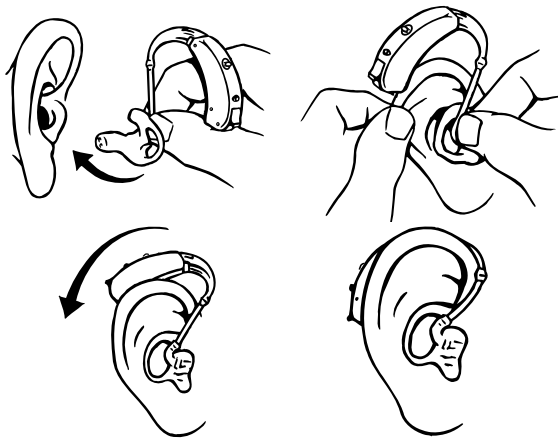


Para mais informações sobre os moldes auriculares e procedimentos, consulte o manual do utilizador referente a auriculares fornecido em separado.

Se o seu auricular não se adaptar ou assentar corretamente, causando desconforto, irritação, vermelhidão ou semelhante, contacte o seu audiólogo.

Remoção do aparelho auditivo

Retire o aparelho auditivo da sua posição atrás da orelha.


A seguir, puxe cuidadosamente o molde do canal auditivo segurando ao mesmo tempo a parte inferior do tubo.

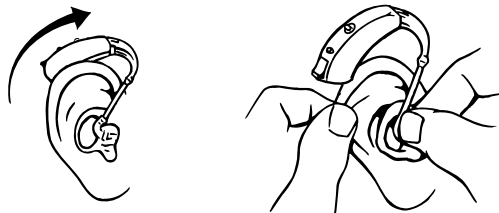

Ajuste do volume

O volume de som do aparelho auditivo é regulado automaticamente em função do ambiente sonoro.

O aparelho auditivo pode, além disso, ser fornecido com um controlo de volume, sob a forma de uma pequena patilha.

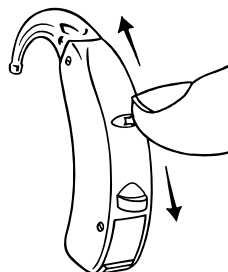

Desloque a patilha para cima para aumentar gradualmente o volume.

Desloque a patilha para baixo para diminuir gradualmente o volume.

Cada vez que utilizar o controlo de volume ouvirá um sinal sonoro, salvo se esta função estiver desativada. Quando o nível de ajuste máximo ou mínimo é atingido, ouvir-se-á um som regular.



AVISO

Se o volume do aparelho auditivo for normalmente demasiado elevado ou demasiado fraco, se produzir sons distorcidos ou se pretender obter mais informações sobre esta matéria, consulte o seu audiólogo.

Programas de audição

Por predefinição, o seu aparelho auditivo possui um programa Padrão, com a opção de um programa adicional Poderão também ser configurados outros programas adicionais. Se esta for a solução escolhida, pode ter até cinco programas.

Padrão	Todas as funções automáticas trabalham para garantir conforto em todas as situações auditivas
Música	Para ouvir música
TV	Para ouvir televisão
T	Neste programa ouve através da telebobina (T) e não através dos microfones (M) do aparelho auditivo. A telebobina é utilizada nos casos em que existe um sistema de circuito fechado instalado. Se ativar o programa de telebobina, poderá ouvir uma fonte sonora específica e "silenciar" os sons envolventes.
M+T	Neste programa ouve através dos microfones (M) do aparelho auditivo e da telebobina (T).
Padrão 1	Todas as funções automáticas trabalham para garantir audibilidade e compreensão da fala em todas as situações auditivas
Aclimação	Este programa possui as mesmas funcionalidades que o programa Principal, mas tem uma amplificação ligeiramente menor
Extensor de Audibilidade*	Torna os sons de alta frequência audíveis
Zen*	Gera diferentes tipos de sons.

*Disponível em separado

Se as suas necessidades de audição mudarem ao longo do tempo, a combinação de programas de audição poderá ser alterada.

Programa Zen

O seu aparelho auditivo pode ser fornecido, opcionalmente, com um programa de audição exclusivo denominado Zen. Este programa cria um fundo de melodias musicais (e, por vezes, um som fluente). Estes sons são ajustados em função da sua perda auditiva. O programa Zen pode ser usado sozinho (sem amplificação), em silêncio, quando não precisar de ouvir os sons envolventes. Pode ainda ser utilizado com o programa Principal, permitindo que os sons envolventes e os sons gerados (sons fractais e ruído) sejam ouvidos ao mesmo tempo.



ATENÇÃO

A utilização dos diferentes programas Zen poderá interferir com a audição de sons envolventes, incluindo o som da fala. Os programas não devem ser utilizados quando a audição desses sons for importante. Nessas situações, coloque o aparelho auditivo num programa não Zen.



ATENÇÃO

Se sentir uma diminuição da sonoridade, da tolerância de sons, da nitidez da fala ou se os zumbidos piorarem, contacte o seu audiólogo.

Benefícios


Para algumas pessoas, o programa Zen pode proporcionar um fundo melodioso relaxante. Quando o programa Zen é utilizado num programa de tratamento de zumbidos, o seu utilizador poderá sentir algum alívio dos zumbidos.

Indicações de utilização

O programa Zen visa proporcionar um fundo melodioso relaxante (ou seja, música/fonte de som) para adultos que pretendem ouvir tal fundo em silêncio. Pode ser usado como ferramenta de terapia num programa de tratamento de zumbidos, prescrito por profissionais de saúde auditiva (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) que possuam formação em tratamento de zumbidos.

Orientações para uso

O Zen tem uma forma muito específica de ser programado no seu aparelho auditivo, pelo que deverá seguir as recomendações do seu profissional de saúde auditiva sobre como, quando e durante quanto tempo deve utilizar o programa.

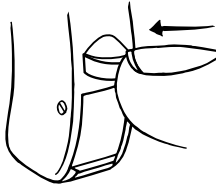


Alternar entre os diferentes programas de audição

Para alternar entre programas, prima o botão de programas brevemente. Sempre que mudar de programa, é emitido um indicador acústico, salvo se esta função tiver sido desativada.

- Programa 1:** Um bip curto ou mensagem
Programa 2: Dois bips curtos ou mensagem

- Programa 3:** Três bips curtos ou mensagem
Programa 4: Um bip longo e um bip curto ou mensagem
Programa 5: Um bip longo e dois bips curtos ou mensagem

Se pretender desativar o botão de programas, consulte o seu audiologista.

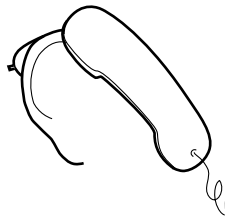


Utilização de um telefone

Ao falar ao telefone, recomendamos que o segure contra a cabeça num ângulo acima do ouvido e não diretamente contra o ouvido. Se o som não for o ideal, experimente mover o auscultador do telefone para uma posição ligeiramente diferente.


LIMPEZA

O aparelho auditivo e o dispositivo dispõem dos seguintes acessórios de limpeza. Para a limpeza do auricular, consulte o manual do utilizador intitulado "Auriculares para aparelhos auditivos retroauriculares da Widex".

- 1: Utensílio de remoção de cera**
2: Pano

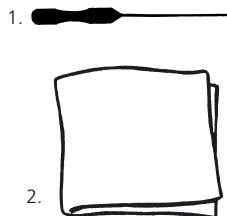

Caso necessite de mais acessórios de limpeza, contacte o seu audiologista.

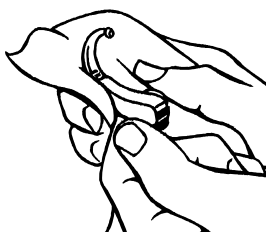


Aparelho auditivo

Limpe o aparelho auditivo com o pano macio após a sua utilização.




AVISO

Nunca utilize água ou soluções de limpeza para limpar o aparelho auditivo, sob pena de comprometer o seu funcionamento.

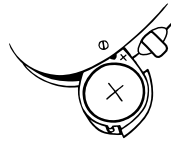

Quando não estiver a utilizar o aparelho auditivo, mantenha-o em local quente e seco com a tampa do compartimento da pilha aberta de modo a arejar o aparelho auditivo e deixá-lo secar.

ACESSÓRIOS

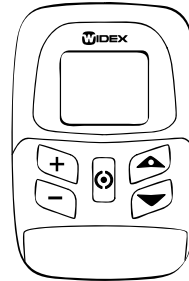

Telecomando

Um telecomando proporciona-lhe várias opções adicionais.

T-DEX

Um dispositivo para ligar o aparelho auditivo a um telemóvel através de uma telebobina.

Para saber se poderá ter vantagens em utilizar um telecomando ou outros acessórios, consulte o seu audiologista.



AVISO

Se o aparelho auditivo for ligado a um equipamento alimentado pela rede elétrica, este equipamento terá de satisfazer as normas IEC 60065, IEC 60950, IEC 60601-1 ou normas de segurança equivalentes. Não ligue o aparelho auditivo a tomadas que tenham um ou mais dos seguintes símbolos:



EM CASO DE ANOMALIA

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho auditivo está totalmente silencioso	O aparelho auditivo não está ligado	Verifique se o compartimento da pilha está completamente para cima
	A bateria não funciona	Coloque uma pilha nova no aparelho auditivo
O volume de som do aparelho auditivo não é suficientemente alto	A pilha está quase sem carga	Coloque uma pilha nova no aparelho auditivo
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu otorrinolaringologista/ médico
	A sua audição poderá ter sofrido alterações	Contacte o seu audiologista
	A abertura do microfone está total ou parcialmente obstruída com sujidade	Contacte o seu audiologista para obter conselhos
O aparelho auditivo emite um assobio contínuo.	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu otorrinolaringologista/ médico
O funcionamento do aparelho auditivo é intermitente	O comutador de ligar/desligar está sujo	Manuseie o comutador várias vezes para trás e para a frente.

Nota: Estas informações contemplam apenas o aparelho auditivo. Para obter informações específicas sobre o seu auricular, consulte o manual do utilizador intitulado "Auriculares para aparelhos auditivos retroauriculares da Widex".

Se o problema persistir, contacte o seu audiologista para obter ajuda.

CUIDADOS A TER COM O APARELHO AUDITIVO

O aparelho auditivo é um objeto valioso e deve ser tratado com cuidado. Apresentamos alguns conselhos que poderá seguir para prolongar a duração do seu aparelho auditivo:



ATENÇÃO

- Desligue o aparelho auditivo quando não estiver a utilizá-lo. Retire a pilha, caso o aparelho auditivo não vá ser utilizado durante vários dias.
- Quando o aparelho auditivo não estiver a ser utilizado, guarde-o na sua caixa, num local fresco e seco, fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- Nunca deixe o aparelho auditivo exposto a temperaturas extremas ou em ambientes muito húmidos. Seque bem o aparelho auditivo depois de qualquer atividade física mais intensa que provoque forte transpiração como, por exemplo, a prática de desportos.
- Evite deixar cair o seu aparelho auditivo. Quando efetuar a limpeza do aparelho ou substituir pilhas, manuseie o aparelho sobre uma superfície macia.
- Não utilize o aparelho auditivo quando está no chuveiro, quando for nadar ou quando utilizar um secador. Evite deixar que o aparelho entre em contacto com substâncias pegajosas ou gordurosas, tais como laca para cabelo ou protetor solar.

AVISOS



AVISO

Os aparelhos auditivos e as pilhas podem ser perigosos se engolidos ou utilizados indevidamente. A ingestão ou a utilização incorreta pode causar lesões graves ou até mesmo a morte. Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.

- Mantenha os aparelhos auditivos e as respetivas peças, acessórios e pilhas, fora do alcance das crianças e de qualquer outra pessoa que possa engolir tais objetos ou causar lesões a si mesma. Não substitua as pilhas na presença delas e não as deixe ver onde guarda as pilhas de reserva. Elimine com cuidado as pilhas gastas.
- As pilhas são muito pequenas e podem ser facilmente confundidas com medicamentos ou algo parecido. Nunca coloque uma pilha ou o aparelho auditivo na boca, sob pena de correr o risco de engoli-los.



AVISO

- Após utilização, limpe e inspecione o seu aparelho auditivo para verificar se o mesmo se mantém intacto. Se o auricular se partir quando colocado dentro do canal auditivo, contacte imediatamente o seu audiologista. Não tente você mesmo remover as peças.



AVISO

- Existe um risco de explosão se a pilha for recarregada ou substituída por uma pilha de tipo incorreto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Nunca permita que outra pessoa utilize o seu aparelho auditivo, sob pena daquela poder sofrer danos permanentes na sua audição.
- Ao selecionar um programa de audição, lembre-se de que existem situações em que é particularmente importante ser capaz de ouvir os sons envolventes (por exemplo: trânsito, sinais de aviso).
- O aparelho auditivo é fabricado com materiais modernos não alérgicos. Não obstante, poderão nalguns casos provocar irritação na pele. Se sentir irritações na pele dentro ou à volta do ouvido ou do canal auditivo, contacte o seu audiologista.



AVISO

- Tenha em atenção que deve permitir uma ventilação regular do ouvido ao utilizar qualquer tipo de aparelho auditivo. Se o ouvido não for adequadamente ventilado, pode existir um risco acrescido de infeção ou doença do canal auditivo. Por essa razão, a Widex recomenda que retire o aparelho auditivo e o auricular do ouvido durante

a noite, a fim de permitir a ventilação do canal auditivo. Se for possível, deve também retirar o aparelho auditivo e o auricular do ouvido durante o dia se houver períodos em que não sejam necessários. Limpe bem e inspecione o aparelho auditivo e o auricular conforme for necessário. Em caso de infeção ou doença, dirija-se a um médico e contacte o seu audiologista para obter conselhos sobre como desinfetar os diferentes componentes do aparelho auditivo. Não utilize em nenhuma circunstância álcool, cloro ou substâncias semelhantes.

- É recomendado o uso regular de um desumidificador para ajudar a que não hajam avarias do aparelho auditivo.
- Não utilize os aparelhos auditivos da Widex em minas ou outros espaços com atmosfera explosiva.



AVISO

- **Não utilize o aparelho auditivo quando fizer exames radiológicos, de ressonância magnética, TAC ou outros tratamentos e exames médicos.** As emissões provenientes desses processos, assim como outros tipos de radiações, como as de um forno micro-ondas, podem danificar o seu aparelho auditivo e fazer com que este aqueça em demasia. As radiações emitidas, por exemplo, por equipamentos de vigilância, alarmes contra roubo e telemóveis são mais fracas, pelo que não causarão quaisquer danos no aparelho auditivo, embora possam produzir interferências audíveis.



ATENÇÃO

- O seu aparelho auditivo foi sujeito a testes de interferências, com base em normas internacionais. Não obstante, é possível verificar-se a ocorrência de interferências imprevistas no aparelho auditivo causadas por radiação eletromagnética emitida por outros produtos, tais como sistemas de alarme, equipamentos de vigilância e telemóveis.
- Apesar de o aparelho auditivo ter sido concebido para respeitar as normas internacionais mais rigorosas relativas à compatibilidade eletromagnética, não é de excluir a possibilidade de o mesmo causar interferências noutros equipamentos, tais como dispositivos médicos.
- Nunca tente abrir ou reparar o aparelho auditivo por sua própria conta.

CONSELHOS

NOTA

- O aparelho auditivo não restabelecerá uma audição normal e não evitará ou melhorará uma perda auditiva resultante de problemas físicos. Poderá, no entanto, contribuir para otimizar o máximo possível a sua capacidade auditiva remanescente. Deve também ter em conta que pode demorar algum tempo a habituar-se a um novo aparelho auditivo e a novos sons.
- Na maioria dos casos, o uso pouco frequente de um aparelho auditivo não lhe permitirá beneficiar integralmente de todas as vantagens proporcionadas.
- O uso de um aparelho auditivo constitui apenas parte do processo de reabilitação auditiva e poderá exigir algum treino e aprendizagem na área da leitura labial.
- O uso de aparelhos auditivos aumenta o risco de acumulação de cera no ouvido. Dirija-se ao seu médico/otorrinolaringologista se suspeitar que tem cera acumulada no ouvido. A cera no ouvido não só reduz a sua audição como também limita, de forma significativa, a eficácia do aparelho auditivo. Lembre-se de pedir ao seu médico para fazer uma limpeza aos ouvidos algumas vezes por ano.



O equipamento elétrico e eletrónico (EEE) contém materiais, componentes e substâncias que podem ser nocivas. Quando estes resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) não são devidamente manuseados, podem representar um risco quer para a saúde humana, quer para o meio ambiente.

Os aparelhos auditivos, os acessórios e as pilhas não devem ser depositados no lixo doméstico comum.

Os aparelhos auditivos, as pilhas e os acessórios devem ser eliminados em locais próprios para resíduos de equipamentos elétricos ou então entregues ao seu audiologista para que sejam descartados de forma segura. Uma eliminação segura ajuda a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

SÍMBOLOS

Os símbolos habitualmente utilizados pela Widex A/S na etiquetagem de dispositivos médicos (etiquetas/IFU/etc.)

Símbolo	Título/Descrição
	Fabricante O produto é produzido pelo fabricante cujo nome e morada estão indicados ao lado do símbolo. Caso seja apropriado, pode também estar indicada a data de fabrico.
	Data de fabrico A data em que o produto foi fabricado.
	Prazo de validade A data após a qual o produto não deve ser utilizado.
	Código do lote O código do lote do produto (identificação do lote ou remessa).
	Número de catálogo O número de catálogo (item) do produto
	Número de série O número de série do produto.*
	Proteja da luz solar. O produto deve ser protegido de fontes de luz e/ou O produto deve ser mantido longe do calor
	Manter seco O produto deve ser protegido da humidade e/ou O produto deve ser protegido da chuva
	Limite inferior de temperatura A temperatura mínima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	Limite superior de temperatura A temperatura máxima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	Limites de temperatura A temperatura máxima e mínima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	Consulte as instruções de utilização As instruções de utilização contêm informação preventiva importante (avisos/precauções) e devem ser lidas antes de utilizar o produto.
	Cuidado/Aviso Textos marcados com um símbolo cuidado/aviso devem ser lidos antes de utilizar o produto.

Símbolo	Título/Descrição
	Marca REEE “Não eliminar no lixo geral” Na altura de descartar o produto, este deve ser enviado para um ponto de recolha assinalado como sendo de reciclagem e recuperação.
	Marca CE Este produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos nas diretrizes de Marcação CE Europeia.
	Alerta O produto vem identificado com a Diretiva ER&ETT 1999/5/CE, como sendo um produto de Classe 2 com algumas restrições de uso em alguns estados membros da CE.
	Marca de seleção C Este produto está em conformidade com os requerimentos regulamentares de CEM e espectro de rádio para produtos fornecidos ao mercado Australiano e Neo-Zelandês.
	Interferência Pode ocorrer alguma interferência eletromagnética na proximidade do produto.

*O número de seis ou sete dígitos no produto é o número de série. Os números de série nem sempre podem ser precedidos de

	WIDEX A/S	Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngbe, Denmark www.widex.com
	0459	Nº manual: 9 514 0298 005 #02 Número: 2015-08
		9 514 029 8005 09

WIDEX e MENU são marcas registadas da Widex A/S.