

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### AS SÉRIES MENU™

Modelo ME-CIC/IIC-TR • ME-CIC/IIC Intracanal profundo/Intracanal invisível



#### O SEU APARELHO AUDITIVO WIDEX

(A ser preenchido pelo audiologista)

- MENU3
- MENU5
- MENU10

Data: \_\_\_\_\_

Tamanho da pilha: 10

Abertura de ventilação:

- Curto
- Comprimento total
- Nenhuma

Programas:


<input checked="" type="checkbox"/> Master
<input type="checkbox"/> Música
<input type="checkbox"/> TV
<input type="checkbox"/> Padrão
<input type="checkbox"/> Aclimação
<input type="checkbox"/> Extensor de Audibilidade
<input type="checkbox"/> Zen

## CONTENTS

DESCRIÇÃO DO APARELHO AUDITIVO .....	1
Indicadores acústicos .....	2
A pilha .....	2
Colocação da pilha .....	2
Indicação de carga fraca da pilha .....	2
Ligar e desligar o aparelho auditivo .....	2
Identificação do lado direito/esquerdo .....	3
Colocação do aparelho auditivo .....	3
Remoção do aparelho auditivo .....	3
Ajuste do volume .....	3
Programas de audição .....	3
Alternar entre os diferentes programas de audição .....	3
LIMPEZA .....	4
Aparelho auditivo .....	4
A saída de som .....	4
O canal de ventilação .....	4
A abertura do microfone .....	4
PROTEÇÃO ANTICERA NANOCARE .....	5
Substituição da proteção anticera NanoCare .....	5
ACESSÓRIOS .....	5
EM CASO DE ANOMALIA .....	5
CUIDADOS A TER COM O APARELHO AUDITIVO .....	6
AVISOS .....	6
CONSELHOS .....	6
SÍMBOLOS .....	7

#### DESCRIÇÃO DO APARELHO AUDITIVO

1. Abertura do microfone
2. Gaveta da pilha
3. Saliência
4. Função ligado/desligado
5. Saída de som
6. Proteção anticera NanoCare
7. Fio de extração
8. Canal de ventilação (curto)
9. Canal de ventilação (comprimento total)

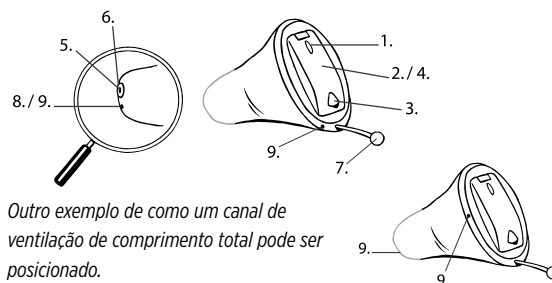


Outro exemplo de como um canal de ventilação de comprimento total pode ser posicionado.

Se necessitar de ajuda para identificar o número de série (composto habitualmente por seis ou sete dígitos) no produto, por favor, contacte o seu audiologista.

O seu aparelho auditivo pode vir fornecido com um programa de audição denominado Zen. Este programa cria um fundo de melodias musicais (e, por vezes, um som fluente). Estes sons são ajustados em função da sua perda auditiva.

Na página 2 deste manual, o seu audiologista poderá indicar, caso exista, o tipo de canal de ventilação utilizado no seu aparelho auditivo.

 **AVISO**  
Este manual contém informações e instruções importantes. Leia com atenção este manual antes de utilizar o aparelho auditivo.

**NOTA**

O seu aparelho auditivo e os acessórios poderão não ser exatamente iguais aos apresentados neste manual. A Widex reserva-se o direito de introduzir quaisquer alterações que considere necessárias.

**Utilização prevista**

Os aparelhos auditivos destinam-se a ser dispositivos de amplificação de condução aérea a serem utilizados em ambientes auditivos quotidianos. Os aparelhos auditivos podem ser fornecidos com o programa Zen, destinado a proporcionar um fundo melodioso relaxante (ou seja, música/fonte de som) para adultos que pretendem ouvir tal fundo em silêncio.

**Indicações de utilização**

Os dispositivos são indicados para indivíduos com níveis de perda auditiva que variam entre perda mínima (10 dB HL) e moderadamente severa (75 dB HL), bem como para todas as configurações de perda auditiva.

Devem ser programados por profissionais de saúde auditiva devidamente qualificados (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) que possuam formação em reabilitação auditiva.

**Indicadores acústicos**

O aparelho auditivo pode ser programado para produzir um sinal que indica a utilização de determinadas funções. O sinal pode ser bips (SmartTone) ou uma mensagem falada (SmartSpeak)\*. O sinal também pode ser desativado.

Funções	Predefinições	Outras definições
Regular o volume com o telecomando	<b>Tom</b>	Desligado
Confirmar utilização do botão de programas do telecomando	Som de clique	Desligado
Mudar de programa com o telecomando	<b>Tons</b>	Mensagem/desligado
Ligar o aparelho auditivo	<b>Tom</b>	Mensagem/desligado
Aviso de pilha fraca	<b>4 bips</b>	Mensagem/desligado
Lembrete de assistência	<b>Desligado</b>	Mensagem

\*O SmartSpeak não está disponível como característica padrão

**A pilha**

Nós recomendamos **pilhas de zinco-ar**. Utilize uma pilha de tamanho **10** para o aparelho auditivo..

Para adquirir pilhas de substituição, consulte o seu audiologista. É importante conhecer a data de validade e ler atentamente as recomendações sobre a eliminação de pilhas usadas indicadas na embalagem. O não cumprimento destas recomendações poderá reduzir o tempo de vida útil das pilhas.




**Colocação da pilha**

Antes de inserir uma pilha nova no aparelho auditivo, não se esqueça de retirar a proteção adesiva. Uma vez retirada a proteção adesiva, a pilha começará a funcionar passados alguns segundos.



**ATENÇÃO**


Não utilize pilhas que ainda apresentem restos de cola da proteção adesiva ou outras substâncias estranhas, sob pena de comprometer o funcionamento do aparelho auditivo.

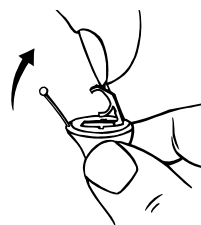

Utilize a saliência para abrir o compartimento da pilha. Não pressione a tampa da pilha para além da posição de abertura.

Coloque a pilha no compartimento de modo a que o pequeno símbolo mais (+) fique visível quando segurar no aparelho auditivo como demonstrado.

Poderá utilizar o ímã fornecido para orientar a pilha na sua posição correta.

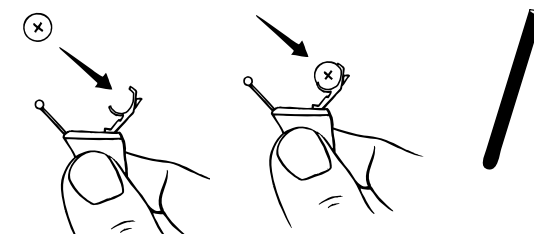

Se o compartimento da pilha não fechar facilmente, tal significa que a pilha não está instalada corretamente.

Quando necessitar de substituir a pilha, lembre-se de efetuar esse procedimento em cima de uma mesa.

**Indicação de carga fraca da pilha**

Exceto no caso de esta função ter sido desativada (consulte a página 10), é emitido um sinal acústico quando a pilha está praticamente descarregada. A Widex recomenda que tenha sempre consigo uma pilha de reserva.




**Nunca** deixe uma pilha descarregada dentro de um aparelho auditivo. As pilhas sem carga podem dar origem a derrames de substâncias suscetíveis de danificarem o aparelho auditivo.




O seu aparelho auditivo poderá deixar de funcionar se, por exemplo, a pilha estiver sem carga. Deverá ter em conta essa possibilidade, sobretudo quando estiver a conduzir ou em situações em que necessita de estar atento a sinais de aviso.

**Ligar e desligar o aparelho auditivo**

O compartimento da pilha do aparelho auditivo também funciona como botão de ligar/desligar.

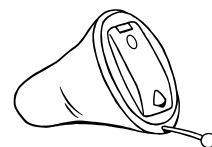


Feche o compartimento da pilha para ligar o aparelho auditivo. Exceto no caso de esta função estar desativada, um indicador acústico indica que o aparelho auditivo foi ligado.

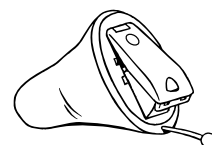

Abra o compartimento da pilha para desligar o aparelho auditivo.

Não se esqueça de desligar o aparelho auditivo quando este não estiver a ser utilizado. Retire a pilha, caso o aparelho auditivo não vá ser utilizado durante vários dias.

## Identificação do lado direito/esquerdo

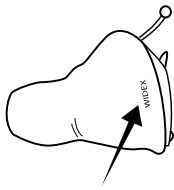

Os seus aparelhos auditivos estarão marcados com um logótipo vermelho da Widex para o ouvido direito e um logótipo azul para o ouvido esquerdo, ou podem também ter uma concha vermelha ou azul, respetivamente. A seta indica a posição do logótipo.


## Colocação do aparelho auditivo




Feche totalmente o compartimento da pilha.



Segure o seu aparelho auditivo pelo fio de extração com o polegar e o indicador. Conduza lentamente o aparelho auditivo para dentro do canal auditivo até sentir resistência.

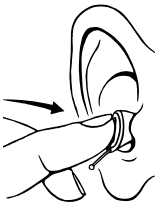


Largue o fio de extração e utilize a ponta do seu indicador para empurrar suavemente o aparelho auditivo para dentro do ouvido até que fique colocado confortavelmente no canal auditivo.

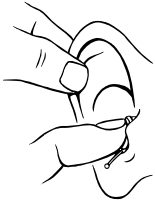

Para ajudar a posicionar o aparelho auditivo de forma adequada, poderá puxar a orelha para trás e para cima com a outra mão.

Se o seu aparelho auditivo não se adaptar ou assentar corretamente, causando desconforto, irritação, vermelhidão ou semelhante, contacte o seu audiologista.

## Remoção do aparelho auditivo

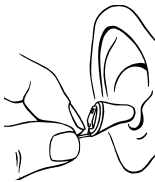

Puxe suavemente o fio de extração com o polegar e o indicador.

Se tiver dificuldade, poderá tentar inclinar cuidadosamente o aparelho auditivo para os lados enquanto estiver a puxar o fio de extração. O processo também poderá ser facilitado se puxar a orelha para trás e para cima com a outra mão.

## Ajuste do volume

O volume de som do aparelho auditivo é regulado automaticamente em função do ambiente sonoro.

Se tiver um telecomando, pode também regular o volume manualmente ou silenciar o seu aparelho auditivo. Qualquer regulação do volume será cancelada quando o aparelho auditivo for desligado ou quando mudar de programa.

Se dispuser de um telecomando, consulte as respetivas instruções de utilização.

### Para silenciar o aparelho auditivo com um telecomando:

Mantenha premida a tecla de redução de volume no telecomando depois de ouvir um sinal acústico (bip) prolongado e até este parar. Se premir brevemente uma das teclas de volume, o som voltará a ser restabelecido.



**AVISO**

Se o volume do aparelho auditivo for normalmente demasiado elevado ou demasiado fraco, se produzir sons distorcidos ou se pretender obter mais informações sobre esta matéria, consulte o seu audiologista.

## Programas de audição

Por predefinição, o seu aparelho auditivo possui um programa Principal. Com um telecomando tem a opção de um programa adicional, e também podem ser disponibilizados vários programas suplementares. Se esta for a solução escolhida, pode ter até cinco programas.

<b>Master</b>	Todas as funções automáticas trabalham para garantir conforto em todas as situações auditivas
<b>Música</b>	Para ouvir música
<b>TV</b>	Para ouvir televisão
<b>Padrão</b>	Todas as funções automáticas trabalham para garantir audibilidade e compreensão da fala em todas as situações auditivas
<b>Acclimação</b>	Este programa possui as mesmas funcionalidades que o programa Principal, mas tem uma amplificação ligeiramente menor
<b>Extensor de Audibilidade*</b>	Torna os sons de alta frequência audíveis
<b>Zen*</b>	Gera diferentes tipos de sons.

*\*Disponível em separado*

Se as suas necessidades de audição mudarem ao longo do tempo, a combinação de programas de audição poderá ser alterada.

### Programa Zen

O seu aparelho auditivo pode ser fornecido, opcionalmente, com um programa de audição exclusivo denominado Zen. Este programa cria um fundo de melodias musicais (e, por vezes, um som fluente). Estes sons são ajustados em função da sua perda auditiva. O programa Zen pode ser usado sozinho (sem amplificação), em silêncio, quando não precisar de ouvir os sons envolventes. Pode ainda ser utilizado com o programa Principal, permitindo que os sons envolventes e os sons gerados (sons fractais e ruído) sejam ouvidos ao mesmo tempo.



**ATENÇÃO**

A utilização dos diferentes programas Zen poderá interferir com a audição de sons envolventes, incluindo o som da fala. Os programas não devem ser utilizados quando a audição desses sons for importante. Nessas situações, coloque o aparelho auditivo num programa não Zen.



**ATENÇÃO**

Se sentir uma diminuição da sonoridade, da tolerância de sons, da nitidez da fala ou se os zumbidos piorarem, contacte o seu audiologista.

### Benefícios

Para algumas pessoas, o programa Zen pode proporcionar um fundo melodioso relaxante. Quando o programa Zen é utilizado num programa de tratamento de zumbidos, o seu utilizador poderá sentir algum alívio dos zumbidos.

### Indicações de utilização

O programa Zen visa proporcionar um fundo melodioso relaxante (ou seja, música/fonte de som) para adultos que pretendem ouvir tal fundo em silêncio. Pode ser usado como ferramenta de terapia num programa de tratamento de zumbidos, prescrito por profissionais de saúde auditiva (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) que possuam formação em tratamento de zumbidos.

## Orientações para uso

O Zen tem uma forma muito específica de ser programado no seu aparelho auditivo, pelo que deverá seguir as recomendações do seu profissional de saúde auditiva sobre como, quando e durante quanto tempo deve utilizar o programa.

## Alternar entre os diferentes programas de audição

Para mudar de programa através do telecomando, prima o botão de programas por alguns instantes. Sempre que mudar de programa, é emitido um indicador acústico, salvo se esta função tiver sido desativada.

**Programa 1:** Um bip curto ou mensagem

**Programa 2:** Dois bips curtos ou mensagem

**Programa 3:** Três bips curtos ou mensagem


**Programa 4:** Um bip longo e um bip curto ou mensagem

**Programa 5:** Um bip longo e dois bips curtos ou mensagem

## LIMPEZA


Estão disponíveis os seguintes acessórios para a limpeza do seu aparelho auditivo. Consulte o seu audiólogista para obter informações sobre os acessórios de que necessita.

1. Escova
2. Pano
3. Utensílio de remoção de cera com uma ponta curta e outra comprida
4. Utensílio comprido de remoção de cera

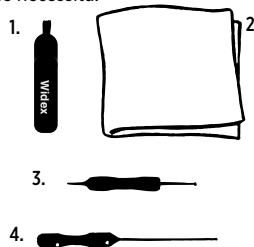

Caso necessite de mais acessórios de limpeza, contacte o seu audiólogista.

## Aparelho auditivo

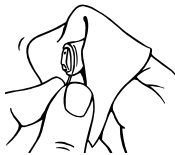

É muito importante para o desempenho do aparelho auditivo evitar a cera e sujidade.

Limpe diariamente o seu aparelho auditivo com um pano macio para o manter seco e limpo de cera ou sujidade.



### AVISO

Nunca utilize água ou soluções de limpeza para limpar o aparelho auditivo, sob pena de comprometer o seu funcionamento.




Quando não estiver a utilizar o aparelho auditivo, mantenha-o em local quente e seco com a tampa do compartimento da pilha aberta de modo a arejar o aparelho auditivo e deixá-lo secar.


Recomendamos que sempre que tire o aparelho auditivo do ouvido, inspecione a saída de som, a abertura do microfone no compartimento da pilha e a abertura do canal de ventilação para assegurar que não ficou acumulada cera ou sujidade nesses pontos.

Em baixo é apresentado um exemplo de como a saída de som, o canal de ventilação e a abertura do microfone podem ser posicionados num aparelho auditivo com um canal de ventilação curto ou um canal de ventilação de comprimento total, respetivamente.

1. Saída de som
2. Canal de ventilação (curto)
3. Abertura do microfone

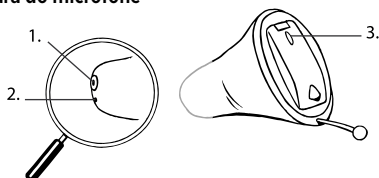


1. Saída de som
2. Canal de ventilação (comprimento total, saída)
3. Canal de ventilação (comprimento total, entrada)
4. Abertura do microfone

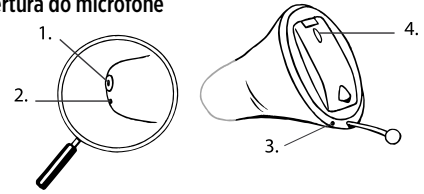

## A saída de som

É importante que a saída de som não esteja obstruída por cera. Se estiver obstruída, proceda da seguinte forma:

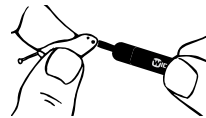

Retire toda a cera visível à volta da saída de som com uma escova pequena ou um pano. Não tente limpar a proteção anticera.

Se a saída de som ainda estiver obstruída, deverá substituir a proteção anticera (consultar páginas 38-42).



### AVISO

Se não conseguir limpar totalmente a saída de som, deve contactar o seu audiólogista. Não insira nada na saída de som, sob pena de danificar o aparelho auditivo.

## O canal de ventilação

Se ficou acumulada cera dentro e/ou à volta da abertura do canal de ventilação, a mesma deve ser removida do seguinte modo:


### Canal de ventilação curto:

Limpe toda a cera do canal de ventilação até onde consegue chegar o utensílio de remoção de cera de ponta comprida n.º 3.



### Canal de ventilação de comprimento total:

Limpe toda a cera do canal de ventilação passando o utensílio comprido de remoção de cera (n.º 4) ao longo de todo o canal de ventilação.

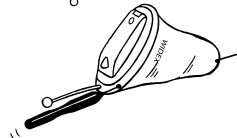

### AVISO


É importante para o desempenho do aparelho auditivo que o canal de ventilação nunca esteja obstruído. Habitue-se a limpar o canal de ventilação todos os dias! Em casos raros, pode-se acumular tanta cera no canal de ventilação que o som do aparelho auditivo pode ser afetado. Nesse caso deve consultar o seu audiólogista.

## A abertura do microfone

Se existir sujidade ou cera à volta da abertura do microfone na parte da frente do aparelho auditivo, a mesma deve ser retirada do seguinte modo:

Abra o compartimento da pilha e retire-a.

Vire o aparelho auditivo de modo a que o compartimento da pilha aberto esteja virado para baixo.

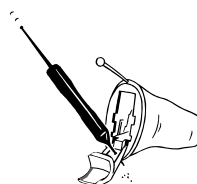

Conduza a ponta curta do utensílio de remoção de cera n.º 3 através da abertura do microfone no compartimento da pilha a partir do interior, como ilustrado.

**AVISO**


Se suspeitar que a cera ou a sujidade se deslocaram para dentro do aparelho auditivo através da abertura do microfone, contacte o seu audiologista. Não introduza nada no microfone.

**PROTEÇÃO ANTICERA NANOCARE**

A proteção anticera NanoCare ajuda a proteger o aparelho auditivo contra a acumulação de cera. Utilize sempre uma proteção anticera NanoCare com o seu aparelho auditivo. Caso contrário, a garantia do seu aparelho auditivo será nula.

A proteção anticera NanoCare é constituída pelos seguintes componentes:

1. Suporte
2. Gancho de remoção
3. Proteção anticera

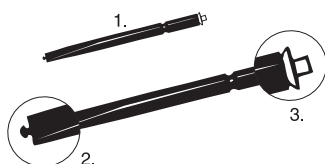
**ATENÇÃO**

A proteção anticera é descartável e destina-se a ser utilizada apenas uma vez. Não tente limpar ou reutilizar um protetor de cerúmen. Isto poderá danificar o seu aparelho auditivo e/ou fazer soltar a proteção anticera no ouvido.


**Substituição da proteção anticera NanoCare**

Introduza o gancho de remoção na proteção anticera usada, situada na saída de som. Puxe a proteção anticera.


1. Abertura do canal de ventilação
2. Saída de som
3. Proteção anticera usada

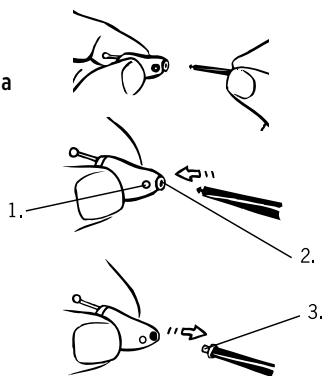

Vire o suporte ao contrário para que a nova proteção anticera possa ser introduzida.

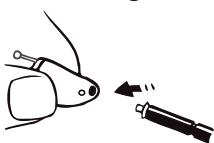


Introduza o suporte na abertura do ponto de saída de som e aplique a proteção anticera na abertura.

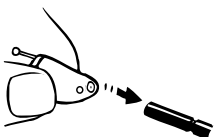

Depois retire o suporte.

A nova proteção anticera sairá automaticamente do suporte. Pressione o aparelho auditivo com cuidado contra uma superfície lisa, de modo a assegurar o bom posicionamento da proteção anticera.

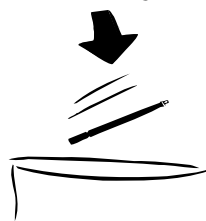


Deite fora o suporte com a proteção anticera usada.

A periodicidade com que as proteções anticera NanoCare devem ser substituídas varia em função da pessoa.

Se tiver qualquer dúvida sobre a proteção anticera NanoCare, contacte o seu audiologista.

**AVISO**

Se verificar que a proteção anticera está solta, remova-a e insira outra nova. Se a proteção anticera se soltar do aparelho auditivo enquanto estiver no canal auditivo, contacte o seu audiologista. Não tente retirar a proteção anticera do ouvido por sua própria conta.

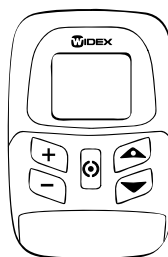**ACESSÓRIOS****Telecomando**

Um telecomando proporciona-lhe várias opções adicionais.

Para saber ser poderá ter vantagens em utilizar um telecomando, consulte o seu audiologista.

**EM CASO DE ANOMALIA**

Esta secção apresenta alguns conselhos e procedimentos a seguir, caso o seu aparelho auditivo deixe de funcionar ou não funcione corretamente. Se o problema persistir, contacte o seu audiologista para obter ajuda.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho auditivo está totalmente silencioso	O aparelho auditivo não está ligado	Verifique se a tampa do compartimento da pilha está fechada
	A bateria não funciona	Coloque uma pilha nova no compartimento da pilha do aparelho auditivo
	A saída de som está obstruída	Consultar página 33
	A abertura do microfone está obstruída	Consultar página 36
O volume de som do aparelho auditivo não é suficientemente alto	A pilha está quase sem carga	Coloque uma pilha nova no compartimento da pilha do aparelho auditivo
	A saída de som está obstruída	Consultar página 33
	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu otorrinolaringologista/ médico
	A sua audição poderá ter sofrido alterações	Contacte o seu audiologista
O aparelho auditivo emite um assobio contínuo.	O seu ouvido está obstruído por cera	Contacte o seu otorrinolaringologista/ médico
	O aparelho auditivo não está colocado corretamente no seu canal auditivo	Retire o aparelho auditivo e volte a colocá-lo
	O aparelho auditivo está folgado no canal auditivo	Contacte o seu audiologista

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho auditivo provoca desconforto	O aparelho auditivo não está colocado corretamente no seu canal auditivo	Consulte o seu audiologista para saber como colocar corretamente o seu aparelho no canal auditivo.
	O aparelho auditivo não encaixa corretamente no seu ouvido	Contacte o seu audiologista
	O seu ouvido externo ou canal auditivo estão doridos	Contacte o seu audiologista

## CUIDADOS A TER COM O APARELHO AUDITIVO

O aparelho auditivo é um objeto valioso e deve ser tratado com cuidado. Apresentamos alguns conselhos que poderá seguir para prolongar a duração do seu aparelho auditivo:



### ATENÇÃO

- Desligue o aparelho auditivo quando não estiver a utilizá-lo. Retire a pilha, caso o aparelho auditivo não vá ser utilizado durante vários dias.
- Quando o aparelho auditivo não estiver a ser utilizado, guarde-o na sua caixa, num local fresco e seco, fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- Nunca deixe o aparelho auditivo exposto a temperaturas extremas ou em ambientes muito húmidos. Seque bem o aparelho auditivo depois de qualquer atividade física mais intensa que provoque forte transpiração como, por exemplo, a prática de desportos.
- Evite deixar cair o seu aparelho auditivo. Quando efetuar a limpeza do aparelho ou substituir pilhas, manuseie o aparelho sobre uma superfície macia.
- Não use o aparelho auditivo quando tomar banho ou for nadar, ou quando utilizar um secador de cabelo ou aplicar perfume, laca para o cabelo e sprays ou cremes corporais, tais como bronzeadores ou outros cremes.

## AVISOS



### AVISO

**Os aparelhos auditivos e as pilhas podem ser perigosos se engolidos ou utilizados indevidamente. A ingestão ou a utilização incorreta pode causar ferimentos graves ou, inclusivamente, a morte. Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.**

- Mantenha os aparelhos auditivos e as respetivas peças, acessórios e pilhas fora do alcance das crianças e de qualquer outra pessoa que possa engolir tais objetos ou causar lesões a si mesma. Não substitua as pilhas na presença delas e não as deixe ver onde guarda as pilhas de reserva. Elimine com cuidado as pilhas gastas.
- As pilhas são muito pequenas e podem ser facilmente confundidas com medicamentos ou algo parecido. Nunca coloque uma pilha ou o aparelho auditivo na boca, sob pena de correr o risco de engoli-los.
- Após utilização, limpe e inspecione o seu aparelho auditivo para verificar se o mesmo se mantém intacto. Se o aparelho auditivo se partir quando colocado dentro do canal auditivo, contacte imediatamente o seu audiologista. Não tente você mesmo remover as peças.



### AVISO

- Existe um risco de explosão se a pilha for recarregada ou substituída por uma pilha de tipo incorreto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Nunca permita que outra pessoa utilize o seu aparelho auditivo, sob pena de aquela poder sofrer danos permanentes na sua audição.
- Ao selecionar um programa de audição, lembre-se de que existem situações em que é particularmente importante ser capaz de ouvir os sons envolventes (por exemplo: trânsito, sinais de aviso).

- O aparelho auditivo é fabricado com materiais modernos não alergénicos. Não obstante, poderão nalguns casos provocar irritação na pele. Se sentir irritações na pele dentro ou à volta do ouvido ou do canal auditivo, contacte o seu audiologista.
- Tenha em atenção que deve permitir uma ventilação regular do ouvido ao utilizar qualquer tipo de aparelho auditivo. Se o ouvido não for adequadamente ventilado, pode existir um risco acrescido de infeção ou doença do canal auditivo. Por essa razão, a Widex recomenda que retire o aparelho auditivo do ouvido durante a noite, a fim de permitir a ventilação do canal auditivo. Se for possível, deve também retirar o aparelho auditivo durante o dia se houver períodos em que não sejam necessários. Limpe bem e inspecione o seu aparelho auditivo conforme for necessário. Em caso de infeção ou doença, dirija-se a um médico e contacte o seu audiologista para obter conselhos sobre como desinfetar o aparelho auditivo. Não utilize em nenhuma circunstância álcool, cloro ou substâncias semelhantes.



### AVISO

- É recomendado o uso regular de um desumidificador para ajudar a que não hajam avarias do aparelho auditivo.
- Não utilize os aparelhos auditivos da Widex em minas ou outros espaços com atmosfera explosiva.



### AVISO

- **Não utilize o aparelho auditivo quando fizer exames radiológicos, de ressonância magnética, TAC ou outros tratamentos e exames médicos.** As emissões provenientes desses processos, assim como outros tipos de radiações, como as de um forno micro-ondas, podem danificar o seu aparelho auditivo e fazer com que este aqueça em demasia. As radiações emitidas, por exemplo, por equipamentos de vigilância, alarmes contra roubo e telemóveis são mais fracas, pelo que não causarão quaisquer danos no aparelho auditivo, embora possam produzir interferências audíveis.



### ATENÇÃO

- O seu aparelho auditivo foi sujeito a testes de interferências, com base em normas internacionais. Não obstante, é possível verificar-se a ocorrência de interferências imprevistas no aparelho auditivo causadas por radiação eletromagnética emitida por outros produtos, tais como sistemas de alarme, equipamentos de vigilância e telemóveis.
- Apesar de o aparelho auditivo ter sido concebido para respeitar as normas internacionais mais rigorosas relativas à compatibilidade eletromagnética, não é de excluir a possibilidade de o mesmo causar interferências noutros equipamentos, tais como dispositivos médicos.
- Nunca tente abrir ou reparar o aparelho auditivo por sua própria conta.

## CONSELHOS

### NOTA

- O aparelho auditivo não restabelecerá uma audição normal e não evitará ou melhorará uma perda auditiva resultante de problemas físicos. Poderá, no entanto, contribuir para otimizar o máximo possível a sua capacidade auditiva remanescente. Deve também ter em conta que pode demorar algum tempo a habituar-se a um novo aparelho auditivo e a novos sons.
- Na maioria dos casos, o uso pouco frequente de um aparelho auditivo não lhe permitirá beneficiar integralmente de todas as vantagens proporcionadas.
- O uso de um aparelho auditivo constitui apenas parte do processo de reabilitação auditiva e poderá exigir algum treino e aprendizagem na área da leitura labial.
- O uso de aparelhos auditivos aumenta o risco de acumulação de cera no ouvido. Dirija-se ao seu médico/otorrinolaringologista se suspeitar que tem cera acumulada no ouvido. A cera no ouvido não só reduz a sua audição como também limita, de forma significativa, a eficácia do aparelho auditivo. Lembre-se de pedir ao seu médico para fazer uma lavagem aos ouvidos algumas vezes por ano.



O equipamento elétrico e eletrônico (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser nocivas e representar um risco para a saúde humana e meio ambiente, quando estes resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) não são devidamente manuseados.

Os aparelhos auditivos, os acessórios e as pilhas não devem ser depositados no lixo doméstico comum.

Os aparelhos auditivos, as pilhas e os acessórios devem ser eliminados em locais próprios para resíduos de equipamentos elétricos ou então entregues ao seu audiologista para que sejam descartados de forma segura. Uma eliminação segura ajuda a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

## SÍMBOLOS

Os símbolos habitualmente utilizados pela Widex A/S na etiquetagem de dispositivos médicos (etiquetas/IFU/etc.)

Símbolo	Título/Descrição
	<b>Fabricante</b> O produto é produzido pelo fabricante cujo nome e morada estão indicados ao lado do símbolo. Caso seja apropriado, pode também estar indicada a data de fabrico.
	<b>Data de fabrico</b> A data em que o produto foi fabricado.
	<b>Prazo de validade</b> A data após a qual o produto não deve ser utilizado.
	<b>Código do lote</b> O código do lote do produto (identificação do lote ou remessa).
	<b>Número de catálogo</b> O número de catálogo (item) do produto
	<b>Número de série</b> O número de série do produto.*
	<b>Proteja da luz solar.</b> O produto deve ser protegido de fontes de luz e/ou O produto deve ser mantido longe do calor
	<b>Manter seco</b> O produto deve ser protegido da humidade e/ou O produto deve ser protegido da chuva
	<b>Limite inferior de temperatura</b> A temperatura mínima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	<b>Limite superior de temperatura</b> A temperatura máxima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	<b>Limites de temperatura</b> A temperatura máxima e mínima a que um produto pode ser exposto com segurança.
	<b>Consulte as instruções de utilização</b> As instruções de utilização contêm informação preventiva importante (avisos/precauções) e devem ser lidas antes de utilizar o produto.

Símbolo	Título/Descrição
	<b>Cuidado/Aviso</b> Textos marcados com um símbolo cuidado/aviso devem ser lidos antes de utilizar o produto.
	<b>Marca REEE</b> "Não eliminar no lixo geral" Na altura de descartar o produto, este deve ser enviado para um ponto de recolha assinalado como sendo de reciclagem e recuperação.
	<b>Marca CE</b> Este produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos nas diretrizes de Marcação CE Europeia.
	<b>Alerta</b> O produto vem identificado com a Diretiva ER&ET 1999/5/CE, como sendo um produto de Classe 2 com algumas restrições de uso em alguns estados membros da CE.
	<b>Marca de seleção C</b> Este produto está em conformidade com os requerimentos regulamentares de CEM e espectro de rádio para produtos fornecidos ao mercado Australiano e Neo-Zelandês.
	<b>Interferência</b> Pode ocorrer alguma interferência eletromagnética na proximidade do produto.

\*O número de seis ou sete dígitos no produto é o número de série. Os números de série nem sempre podem ser precedidos de **SN**

	<b>WIDEX A/S</b>	Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark www.widex.com
	<b>0459</b>	<b>Nº manual:</b> 9 514 0208 005 #04
		9 514 020 8005 08

WIDEX, MENU e NANOCARE são marcas registadas da WIDEX A/S.